

## Fiche Bon Usage

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

### PRISE D'AIR

1. Synonymes :

Dispositif obturable d'entrée d'air stérile.

2. Utilité :

La prise d'air incorporée au perforateur, a pour rôle d'assurer une entrée d'air stérile dans un contenant rigide (flacons de verre ou de plastique), afin de permettre l'écoulement du liquide à un débit convenable et ne doit donc pas être utilisée pour les contenants souples (poches en système clos).

3. Descriptif technique :

Elle est constituée d'une membrane hydrophobe, dont le diamètre des pores varie entre 0,22 et 0,35 micron, avec un dispositif d'obturation qui doit être fermé pour une utilisation sur poche et ouvert pour une utilisation sur flacon rigide. Cet obturateur est en règle livré fermé.

4. Matériaux :

Acrilyque